



People.Health.Care.

Actico® UlcerSys **NIEUW**

Eenvoud in compressie.



Actico® UlcerSys **NIEUW**

Compressiekoussysteem.

Zo eenvoudig: Actico® UlcerSys bij ulcus cruris venosum.

Ontdek hoe eenvoudig het behandelen van ernstige vaatstoornissen kan zijn: met Actico UlcerSys, een uit twee lagen bestaand compressiekoussysteem dat vooral kan worden gebruikt voor het behandelen van ulcus cruris venosum en het voorkomen van recidieven daarvan.

Indicaties

- bij ulcus cruris venosum na oedeemvermindering
- als preventie van een recidiverend chronisch open been
- bij stuwingsdermatose zoals eczeem, pigmentatie, lipodermatosclerose, atrophie blanche
- bij veneus oedeem
- voor het behandelen van een posttrombotisch syndroom
- voor de nabehandeling bij sclerotherapie en varicesoperaties
- na het uitnemen van een ader voor een bypassoperatie (hartoperatie)

Zo doordacht: de combinatie doet het 'm.



Onderkous

- fixeert wondverbanden en beschermt de gevoelige huid
- kan 's nachts worden gedragen
- verkrijgbare kleuren: wit of beige
- 10–14 mmHg

Bovenkous

- wordt 's morgens over de onderkous aangetrokken
- verhoogt overdag de compressiedruk
- verkrijgbare kleuren: beige of zwart
- 26–34 mmHg

Het systeem bereikt de therapeutisch noodzakelijke druk van ongeveer 40 mmHg rond de enkel.¹



Eenvoudig aan- en uittrekken van de bovenkous door een plat en glad oppervlak van de onderkous.

Bij ulcus cruris venosum.

Zo overtuigend: uw voordelen in één oogopslag.



Actico UlcerSys maakt compressietherapie eenvoudiger.

Productvoordeel

Voordelen voor u en uw patiënten

Op de behoefte afgestemd drukverloop en een blijvend goede pasvorm door speciale tricotconstructie



Meer behandelzekerheid!

Eenvoudig en snel aan te trekken



Bespaart tijd gedurende de behandeling!

Hoog draagcomfort en aantrekkelijk design



Meer therapietrouw!

Compressie op maat door de onderkous in meerdere lagen over elkaar te dragen (max. twee tot drie lagen)*



Meer flexibiliteit!

* 1 laag ~ 12 mmHg, 2 lagen ~ 24 mmHg, 3 lagen ~ 36 mmHg

Zo comfortabel: de onderkous.



twee tot drie lagen over
elkaar draagbaar



fixeert wondverbanden

plat boordje blijft
goed op zijn plaats

de speciale tricotconstructie
(‘inlay-yarn’) zorgt voor een
blijvend goede pasvorm

platte naad bij
de tenen voor
een uitstekend
draagcomfort

verstevigde hielconstructie
voor een goede pasvorm



Zo betrouwbaar: de bovenkous.


fijne oppervlaktestructuur
voor een subtiele look

plat boordje voor
een goede pasvorm

hielconstructie voor
een goede pasvorm



Zo veelzijdig: een oplossing voor elke fase.

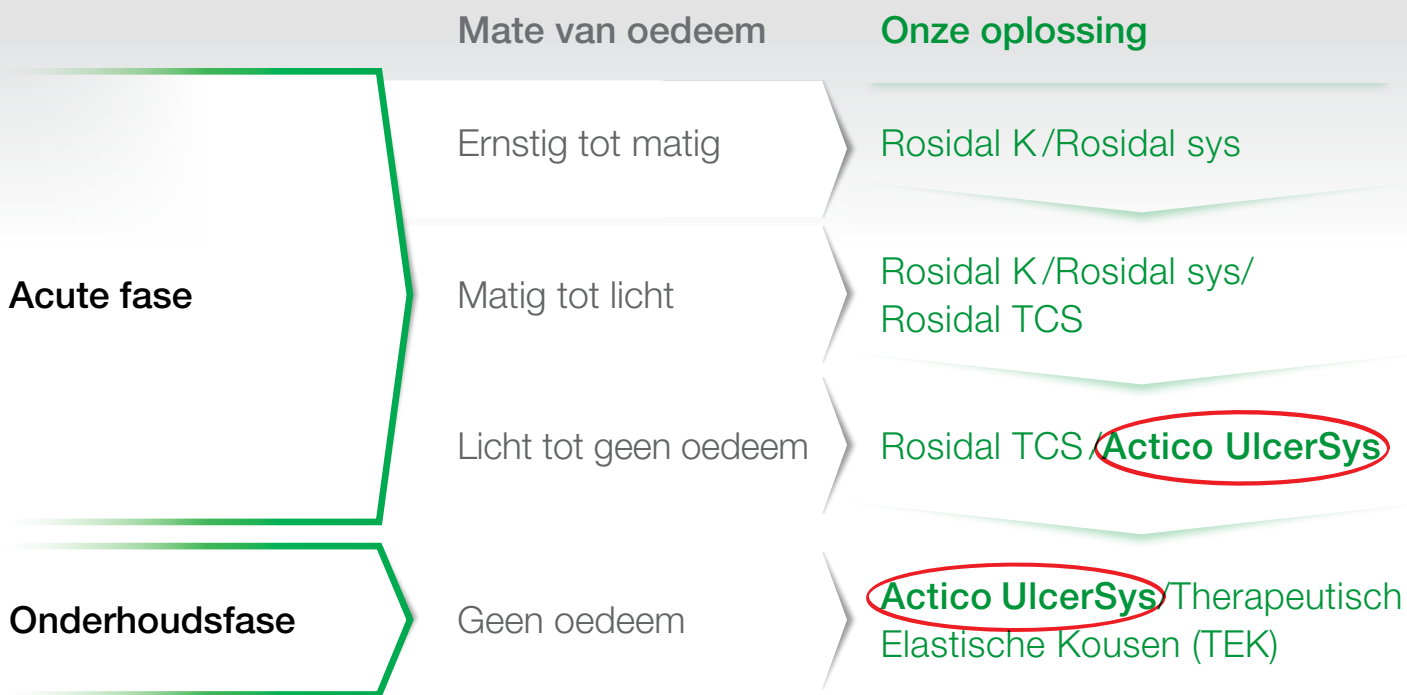

Zo relevant: door onderzoek bewezen.

De therapie met een uit twee lagen bestaand compressiekoussysteem verkort de genezingstijd en vermindert recidieven.²⁻⁴

Een uit twee lagen bestaand compressiekoussysteem bereidt patiënten voor op de onderhoudsfase met compressiekousen.¹

- 1) Ashby RL, Gabe R, Ali S, et al. (2014) Clinical and cost-effectiveness of compression hosiery versus compression bandages in treatment of venous leg ulcers (Venous leg Ulcer Study IV, VenUS IV): a randomised controlled trial. *Lancet* 383(9920): 871-9
- 2) Reich-Schupke S, Stücker M. *Moderne Kompressionstherapie: Ein praktischer Leitfaden*. Köln: Viavital Verlag GmbH, 2013.
- 3) Heinen MM, van Achterberg T, op Reimer WS, van de Kerkhof PCM, Laat E. Venous leg ulcer patients: a review of the literature on lifestyle and pain-related interventions. *J Clin Nurs*, 2014; 13 (3): 355-366.
- 4) Nelson EA, Bell-Syer SEM. Compression for preventing recurrence of venous ulcers. *Cochrane Database Syst Rev*, 2012; 8: CD002303



People.Health.Care.

Bestelinformatie

Actico® UlcerSys Compressiekoussysteem NIEUW

1 bovenkous (B) + 2 onderkousen (O) per verpakking

Kleur B/O	Lengte	Maat	Enkelomvang cB (cm)	Kuitomvang cC (cm)	Beenlengte ID (cm)	REF	ZI	CNK	Verpakking (stuks)
	Standaard	S	19-21	31-39	38-42	32 510	16542223	3553-781	1/16
		M	21-23,5	33-41	38-42	32 512	16542258	3553-807	1/16
		L	23-27	35-44	38-42	32 514	16542274	3553-823	1/16
		XL	27-32	39-48	38-42	32 516	16542290	3553-849	1/16
		XXL	32-37	43-52	38-42	32 518	16542312	3553-864	1/16
	Lang	S	19-21	31-39	> 42	32 511	16542231	3553-799	1/16
		M	21-23,5	33-41	> 42	32 513	16542266	3553-815	1/16
		L	23-27	35-44	> 42	32 515	16542282	3553-831	1/16
		XL	27-32	39-48	> 42	32 517	16542304	3553-856	1/16
		XXL	32-37	43-52	> 42	32 519	16542320	3553-872	1/16
	Standaard	S	19-21	31-39	38-42	39 710	16542452	3553-880	1/16
		M	21-23,5	33-41	38-42	39 712	16542479	3553-906	1/16
		L	23-27	35-44	38-42	39 714	16542495	3553-922	1/16
		XL	27-32	39-48	38-42	39 716	16542517	3553-948	1/16
		XXL	32-37	43-52	38-42	39 718	16542533	3553-963	1/16
	Lang	S	19-21	31-39	> 42	39 711	16542460	3553-898	1/16
		M	21-23,5	33-41	> 42	39 713	16542487	3553-914	1/16
		L	23-27	35-44	> 42	39 715	16542509	3553-930	1/16
		XL	27-32	39-48	> 42	39 717	16542525	3553-955	1/16
		XXL	32-37	43-52	> 42	39 719	16542541	3553-971	1/16

Actico® UlcerSys Onderkous NIEUW

3 onderkousen (O) per verpakking

Kleur O	Lengte	Maat	Enkelomvang cB (cm)	Kuitomvang cC (cm)	Beenlengte ID (cm)	REF	ZI	CNK	Verpakking (stuks)
	Standaard	S	19-21	31-39	38-42	32 530	16542339	3552-817	3/150
		M	21-23,5	33-41	38-42	32 532	16541472	3552-833	3/150
		L	23-27	35-44	38-42	32 534	16542371	3552-858	3/150
		XL	27-32	39-48	38-42	32 536	16542401	3552-874	3/150
		XXL	32-37	43-52	38-42	32 538	16542436	3552-890	3/150
	Lang	S	19-21	31-39	> 42	32 531	16542347	3552-825	3/150
		M	21-23,5	33-41	> 42	32 533	16542363	3552-841	3/150
		L	23-27	35-44	> 42	32 535	16542398	3552-866	3/150
		XL	27-32	39-48	> 42	32 537	16542428	3552-882	3/150
		XXL	32-37	43-52	> 42	32 539	16542444	3552-908	3/150
	Standaard	S	19-21	31-39	38-42	39 740	16542568	3552-916	3/150
		M	21-23,5	33-41	38-42	39 742	16542584	3552-932	3/150
		L	23-27	35-44	38-42	39 744	16542606	3552-957	3/150
		XL	27-32	39-48	38-42	39 746	16542622	3552-973	3/150
		XXL	32-37	43-52	38-42	39 748	16541766	3552-999	3/150
	Lang	S	19-21	31-39	> 42	39 741	16542576	3552-924	3/150
		M	21-23,5	33-41	> 42	39 743	16542592	3552-940	3/150
		L	23-27	35-44	> 42	39 745	16542614	3552-965	3/150
		XL	27-32	39-48	> 42	39 747	16542630	3552-981	3/150
		XXL	32-37	43-52	> 42	39 749	16542657	3552-005	3/150

