

PRODUCTFICHE




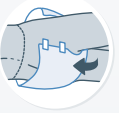






PRODUCTSPECIFICATIES

iD Expert Slip		1 Snelle absorptie	De acquisitielaag zorgt voor een snelle doorlating van de urine doorheen de meerlagige absorberende kern die SAP (Super Absorberend Poeder) bevat. SAP absorbeert en blokkeert de urine in de kern van het verband waardoor de kans op terugvloeiën vermindert, hetgeen een "droog gevoel" creëert.
		2 Geurcontrole	Het geurcontrolesysteem dat aanwezig is in de absorberende kern voorkomt de vorming van ammoniak waardoor geen onaangename geurtjes vrijkomen.
		3 Anti-lekbescherming	Geïntegreerde anti-lekrandjes, bestaande uit waterbestendig materiaal, voorkomen zijdelingse lekkages waardoor zekerheid en discretie behouden blijven.
		4 Katoenaanvoelend	Een zachte toplaag biedt een maximum aan comfort en discretie.
		5 Dubbele vochtindicator	De vochtindicator duidt aan wanneer het product dient verschoond te worden.
		Dermatologisch getest	iD-producten zijn dermatologisch getest en veroorzaken geen huidirritaties.
		Geen latex	Onze producten zijn latexvrij.

AANLEGTECHNIEK



iD Expert Slip	1 Vouw het verband voorzichtig open en vouw het vervolgens in de lengte dubbel tot een goot. Hierdoor worden de anti-lekrandjes geactiveerd. Het gedeelte met de fixatietapes is de achterzijde van het verband.			1 Vouw het verband voorzichtig open en vouw het vervolgens in de lengte dubbel tot een goot. Hierdoor worden de anti-lekrandjes geactiveerd. Draai de persoon op de zijde. Het gedeelte met de fixatietapes is de achterzijde van het verband.
	2 Breng de iD Expert Slip aan tussen de benen, van achter naar voor en open de achterzijde van het verband. Het einde van de pulpmat is gepositioneerd ter hoogte van het staartbeen. De vochtindicator loopt evenwijdig met de bilnaad.			2 Plaats de achterzijde van het verband tegen de stuit van de persoon zodanig dat het einde van de pulpmat is gepositioneerd ter hoogte van het staartbeen. De vochtindicator loopt evenwijdig met de bilnaad. Duw de zijvleugel van het verband onder de persoon door. Draai de persoon op de rug en trek de zijvleugel onder het lichaam vandaan. Trek de gevormde goot van het verband zigzaggend tussen de benen omhoog tot het goed aansluit in de liezen.
	3 Kleef eerst de onderste fixatietapes schuin opwaarts op het verband en zorg voor een goede pasvorm aan de benen. Kleef daarna de bovenste fixatietapes recht of schuin naar onder. Oefen een lichte wrijving uit voor een goede hechting.			3 Kleef eerst de onderste fixatietapes schuin opwaarts op het verband en zorg voor een goede pasvorm aan de benen. Kleef daarna de bovenste fixatietapes recht of schuin naar onder. Oefen een lichte wrijving uit voor een goede hechting.
	4 Controleer comfort en pasvorm. De kleefstroken kunnen geherpositioneerd en herkleefd worden.			4 Controleer comfort en pasvorm. De kleefstroken kunnen geherpositioneerd en herkleefd worden.