

## Punctietechniek BD Insyte-W™ katheters in BD Vialon™

*In de volgende richtlijnen wordt beschreven hoe een Becton Dickinson Vialon® katheter moet ingebracht worden. Voor andere merken kan een andere techniek vereist zijn.*



### STAP 1

*Kies de punctieplaats, leg een stuwband aan en ontsmet de punctieplaats (conform het ziekenhuisprotocol).*



### STAP 2

*Neem de katheter uit de verpakking en verwijder voorzichtig de beschermhuls. De nauw aansluitende tip van de Vialon katheter dient vooraf zachtjes losgemaakt te worden van de naald om het afschuiven in de vene soepel en gelijkmatig te laten verlopen (naald ± 1 mm achteruitschuiven en 1/2 draai geven).*

Let erop dat het aanzetstuk van de katheter weer op de doorschijnende naaldbasis wordt geplaatst.



### STAP 3

*(Voor een vlotte inbreng moet u de vene goed dichtgedrukt houden. Druk stevig op de huid bij het inbrengen van de katheter.)*

*Prik aan onder een zeer kleine hoek met een trage, zachte beweging om perforatie van de achterwand te voorkomen.*

U moet geen weerstand verwachten bij het prikken. De Vialon katheternaald is zeer scherp en goed gelubriceerd. De katheter sluit heel nauw aan op de naaldhiel.



BD Medical  
info.benelux@bd.com  
[www.bd.com](http://www.bd.com)

T België: +32 53 72 02 11  
F België: +32 53 72 02 00

Nederland: +31 20 582 94 16  
Nederland: +31 20 582 94 2



#### STAP 4

Verklein de hoek van de katheter ten opzichte van de huid zodra de bloedreflux zichtbaar is (katheter quasi evenwijdig brengen met de huid). **Schuif naald en katheter nog  $\pm 2$  mm verder in de vene, tot net voorbij het conische gedeelte van de katheter.**



#### STAP 5

Houd de naald stil en schuif de katheter over de naald verder in de vene. **Trek de naald niet terug voordat de katheter volledig over de naald heen in de vene is ingebracht.**

De naald niet meer terug in de katheter brengen (u zou de katheter kunnen beschadigen - verwijder indien nodig de gehele set - naald en katheter - en begin opnieuw).



#### STAP 6

Verwijder de stuwband. Plaats een gaaskompres onder de hub van de katheter. Trek de naald terug terwijl u druk uitoefent op de vene, ter hoogte van het distale einde van de katheter, om terugvloed van bloed te vermijden.

Gebruikte naalden kunnen besmet zijn en moeten worden weggegooid in punctieresistente containers. Plaats de naaldbeschermers niet terug op de naald. Houd rekening met nationale/institutionele richtlijnen en procedures.



#### STAP 7

Sluit de intraveneuze toedieningsset aan of sluit de katheter af.

Volg het ziekenhuisprotocol voor het bevestigen en afdekken van de katheter



BD Medical  
info.benelux@bd.com  
[www.bd.com](http://www.bd.com)

T België: +32 53 72 02 11  
F België: +32 53 72 02 00

Nederland: +31 20 582 94 16  
Nederland: +31 20 582 94 21