

NeutraClear® IV Connector

Praktische handleiding

- **Compacte vorm** – minder gewicht, kleinere omvang. Geschikt voor gebruik op neonatologie en pediatrie.
- **Gesloten-extensieconfiguraties** om het aantal connecties te beperken.
- **Meerdere configuraties mogelijk** om alle behoeften van de patiënt te dekken.



1. Ontluchten:

Keer de NeutraClear® IV-connector om om te ontluchten. Bevestig een volledig ontluchtte spuit of infuusleiding op de NeutraClear® IV-connector. Bevestig de NeutraClear® IV-connector op de hub van het vasculaire toedieningssysteem. Draai tot vast. Draai niet te vast aan.

Nuttige tips:

- Tik tijdens het ontluchten tegen de NeutraClear® IV-connector om alle lucht te verwijderen.
- Ontluchten garandeert dat het systeem lucht vrij is.
- Wanneer een ontlucht systeem niet onmiddellijk bevestigd wordt, kan er opnieuw lucht in dringen.
- Neem de NeutraClear® IV-connector bij het manipuleren, plaatsen en verwijderen steeds bij het corpus vast om hem niet onopzettelijk vaster te draaien of los te maken.



2. Desinfecteren:

Desinfecteer het septum van de NeutraClear® IV-connector voor en na elke manipulatie met 70% alcohol of chloorhexidine/alcohol. Wrijf gedurende 15 seconden en laat drogen. Mechanisch reinigen gedurende een correcte desinfectietijd verbetert het ontsmettende effect.

Nuttige tips:

- Wrijf met alcohol of een goedgekeurd ontsmettingsmiddel gedurende 15 seconden of volgens het protocol van uw ziekenhuis. De INS en het CDC adviseren de ontsmetting van het toedieningssysteem om infectie te voorkomen. Onderzoek toont aan mechanisch reinigen en een langere ontsmettingsduur het desinfecteren bevorderen.
- Laat het ontsmettingsmiddel volledig drogen voor u het systeem aankoppelt. Het desinfecteren is niet compleet voor het ontsmettingsmiddel volledig verdampt is. Aankoppelen wanneer het ontsmettingsmiddel niet volledig droog is kan een optimale koppeling en loskoppeling negatief beïnvloeden.



3. Toedienen:

Koppel de ontluchtte infuusleiding of spuit aan op de NeutraClear® IV-connector.

Nuttige tips:

- Controleer voor het toedienen de doorgankelijkheid van de katheter volgens het juiste protocol.
- Neem steeds de connector en NOOIT de katheter vast om onopzettelijk vastdraaien of losmaken te voorkomen.
- Luer-spuiten moeten recht aangebracht en vervolgens een kwartslag in wijzerzin gedraaid worden. Laat een luer-koppeling nooit onbewaakt achter.
- De NeutraClear® IV-connector kan 600 keer geactiveerd worden.



4. Loskoppelen:

Na het toedienen: spoel de katheter/NeutraClear® met een push-pause (pulserende) techniek, neem de NeutraClear® vast en koppel de spuit of toedieningsset los.

Nuttige tips:

- Om het systeem los te koppelen neemt u het corpus van de NeutraClear® IV-connector vast en draait u de luer-spuit of infuusleiding in tegenwijzerzin los.



5. Flush:

Spoel de NeutraClear® IV-connector na elk gebruik volgens het protocol van uw instelling. Spoel met een normale zoutoplossing of een gehepariniseerde zoutoplossing.

Nuttige tips:

- De NeutraClear® IV-connector is transparant om gespoeld te kunnen met een zoutoplossing waardoor er geen gebruik gemaakt moet worden van heparine.
- Spoel de connector steeds na een infusie of aspiratie met de push-pause-techniek om de katheter doorgankelijk te houden. De spoelvolumes zijn afhankelijk van het vasculaire toedieningssysteem en de patiënt.

Voor een complete gebruiksaanwijzing gelieve de handleiding te raadplegen.