



Het efficiënte systeem voor preventie en bescherming van een beschadigde huid

PROSHIELD[◇] Plus

Huidbeschermmer

PROSHIELD[◇] Foam & Spray

Reinigingsmiddel voor incontinentieverzorging



Het efficiënte systeem voor preventie en bescherming van een beschadigde huid

PROSHIELD® Plus huidbeschermer is een gladde, dik-vloeibare, vetvrije, geurloze vochtbarrièrecrème die geïrriteerde, gesprongen, gebarsten droge huid helpt voorkomen en beschermen. De voor dagelijks gebruik geschikte PROSHIELD Plus kleeft goed aan vochtige en droge huid en is gemakkelijk te verwijderen.

PROSHIELD Foam & Spray reinigingsmiddel voor incontinentieverzorging is een mild, vochtinbrengend reinigingsmiddel met uitgebalanceerde pH zonder aerosol dat niet afgespoeld hoeft te worden en irritatie en droogheid van de huid van de patiënt tot een minimum beperkt. Het product is samengesteld om geuren en afgebroken opgedroogde feces te helpen verwijderen en het minder noodzakelijk te maken kwetsbaar weefsel te schrobben.

Voordelen

PROSHIELD Plus

- Effectieve barrière - tegen huidirritatie
- Preventie - geschikt voor dagelijks gebruik als preventieve maatregel om de gezonde huid te beschermen tegen de invloed van incontinentie
- Bescherming - eenvoudig aan te brengen op de beschadigde huid en blijft goed zitten op vochtige wonden
- Biedt bescherming tegen diarree en incontinentie
- Vochtinbrengend - geïndiceerd om een droge huid te beschermen en hydrateren
- Verstopt absorberende kompressen of verbanden niet

PROSHIELD Foam & Spray

- Zacht - een zacht reinigingsmiddel met uitgebalanceerde pH dat niet afgespoeld hoeft te worden, ontworpen om de huid soepel en gehydrateerd te houden
- Grondige reiniging - om geur te verwijderen en opgedroogde ontlasting op te lossen
- Flexibel - geïndiceerd voor intacte en beschadigde huid veroorzaakt door incontinentie
- Heeft een breed scala aan indicaties - het is o.a. geïndiceerd voor totale lichaamsreiniging, het verwijderen van antiseptische oplossingen, moeilijk te verwijderen vuil en huidbeschermers zoals PROSHIELD Plus

Indicaties

PROSHIELD Plus is bestemd voor de verzorging van intacte of beschadigde huid bij veelvoorkomende ernstige of chronische diarree of incontinentie. Ook bestemd voor vochtinbrenging in en bescherming van zeer droge huid.

PROSHIELD Foam & Spray is bestemd voor de reiniging van intacte of beschadigde huid bij veelvoorkomende ernstige of chronische diarree of incontinentie. Ook bestemd voor het verwijderen van urine en feces, opgedroogd bloed, postoperatieve antiseptische oplossingen en ander débris dat moeilijk van de huid te verwijderen is en voor het verwijderen van huidbarrières zoals PROSHIELD Plus huidbescherming.

Gebruiksaanwijzing

PROSHIELD Plus

Reinig het gehele huidgebied grondig met een geschikt reinigingsmiddel. Was of reinig de handen, knijp de zalf uit de tube en breng rijkelijk een dikke laag PROSHIELD Plus aan. Zo vaak als nodig herhalen.

PROSHIELD Foam & Spray

BIJ GEBRUIK VAN EEN NIEUWE FLACON, de sproeikop gebruiksklaar maken door één- of tweemaal de pomp in te drukken alvorens de flacon in gebruik te nemen. Om foam te produceren, draait u het sproeikop naar de stand "on" en trekt u de tip naar voren. Om te sprayen, drukt u de tip in.

VOOR INCONTINENTIEVERZORGING. Spray PROSHIELD Foam & Spray reinigingsmiddel op de betreffende plek en veeg het af. PROSHIELD Foam & Spray reinigingsmiddel wordt gebruikt voordat een geschikte huidbeschermer zoals PROSHIELD Plus wordt aangebracht. Spoelen of gebruik van een vochtinbrengende crème is niet nodig.

Waarschuwingen / voorzorgsmaatregelen

PROSHIELD Plus / PROSHIELD Foam & Spray

UITSLUITEND VOOR UITWENDIG GEBRUIK. Aanraking met de ogen vermijden. Bij aanraking met de ogen grondig met water spoelen. Indien de aandoening verslechtert of binnen 7 dagen niet verbetert, een arts raadplegen. Gebruik vermijden bij personen van wie bekend is dat zij een allergische overgevoeligheid voor enige van de vermelde bestanddelen hebben. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum. Niet gebruiken indien het product beschadigd is.



PROSHIELD Plus

Huidbeschermer

Artikelnr.	Inhoud	Verpak.	CNK
8213-0300-04	Tube 115gr	1	2731-008

PROSHIELD Foam & Spray

Reinigingsmiddel voor incontinentieverzorging

Artikelnr.	Inhoud	Verpak.	CNK
8213-0150-08	Flacon 235 ml	1	3198-827

Smith & Nephew N.V.-S.A.

Hector Henneaulaan 366

1930 Zaventem

T 02 702 29 11

F 02 702 29 04

www.smith-nephew.be

° Handelsmerk van Smith & Nephew

M-B-NL-08-14-207