


Intelli Cuff HEM-FL31 (HEM-FL31-E)


• <i>Instructions for use</i>	2	EN
• <i>Mode d'emploi</i>	4	FR
• <i>Gebrauchsanweisung</i>	6	DE
• <i>Istruzioni per l'uso</i>	8	IT
• <i>Instrucciones de uso</i>	10	ES
• <i>Gebruiksaanwijzing</i>	12	NL
• <i>Инструкция для пользователя</i>	14	RU
• <i>إرشادات الاستخدام</i>	2	AR

Brassard Intelli HEM-FL31 (HEM-FL31-E)



Merci d'avoir acheté le brassard Intelli HEM-FL31 d'OMRON. Ce brassard est adapté à une circonférence de bras comprise entre 22 et 42 cm. Se reporter au mode d'emploi d'origine du tensiomètre.

 Lire attentivement le présent mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.
Le conserver pour s'y référer ultérieurement.

 **Attention :** Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées chez l'utilisateur ou le patient, ou endommager l'appareil ou tout autre équipement.



- Utiliser uniquement le tensiomètre OMRON approuvé pour ce brassard.
- Utiliser le même brassard, qu'indiqué sur le côté du produit près de la prise d'air. Ne pas utiliser d'autres types de brassard.
- Ne pas laver ni mouiller le brassard.

Mode d'emploi

Retirer les vêtements trop serrés de votre bras gauche et descendre les manches retroussées. Ne pas placer le brassard par dessus des vêtements épais.

1. Insérer fermement la prise de gonflage dans la prise à air.
2. Poser le brassard sur de la partie supérieure du bras.

La partie inférieure du brassard doit être placée entre 1 et 2 cm au-dessus du coude. Le tuyau d'air est centré au milieu de la face interne du bras.

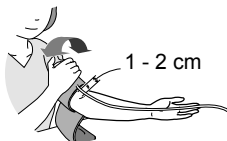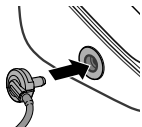



3. Refermer convenablement la bande de tissu du brassard.

Prises de mesures au bras droit

Le tuyau d'air doit se trouver sur le côté de votre coude. Veiller à ne pas poser le bras sur le tuyau à air.

Remarque : La pression artérielle peut être différente entre le bras droit et le bras gauche, et les valeurs de pression artérielle mesurées peuvent par conséquent être également différentes. OMRON recommande de toujours utiliser le même bras pour la mesure. Si les valeurs mesurées aux deux bras sont trop différentes, consulter un médecin pour savoir quel bras utiliser pour la mesure.

- Nettoyer le brassard à l'aide d'un chiffon doux et sec, ou à l'aide d'un chiffon doux et humide et de savon neutre.
- Ne pas utiliser d'essence, de diluant ni d'autres solvants pour nettoyer le brassard.
- Ne pas ranger le brassard dans des lieux soumis à des températures extrêmes, à l'humidité, à la lumière directe du soleil, à la poussière ou à des vapeurs corrosives.
- Ne pas plier ni tordre excessivement le tuyau d'air.


Maintenance



Ce brassard est conforme aux dispositions de la Directive CE 93/42/CEE sur les appareils médicaux, ainsi qu'à la norme européenne EN1060 sur les Tensiomètres non invasifs, Partie 1 : Exigences générales, et Partie 3 : Exigences complémentaires concernant les systèmes électromécaniques de mesure de la pression artérielle.

Ce produit OMRON est conforme aux exigences du système de qualité rigoureux d'OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., JAPON.

Description du produit	Brassard de tensiomètre
Modèle	Brassard Intelli HEM-FL31 (HEM-FL31-E)
Circonférence du bras	22 - 42 cm
Plage de mesure	Pression : de 0 à 299 mmHg Pouls : de 40 à 180 battements/min.
Précision	Pression : ± 3 mmHg Pouls : ± 5 % de la valeur affichée
Durée de vie utile	1 an

<p>Manufacturer Fabricant Hersteller Fabricante Produttore Fabrikant Производитель الشركة المُصنعة</p> 	<p>OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPAN</p>
<p>EU-representative Mandataire dans l'UE EU-Vertreter Representante en la UE Rappresentante per l'UE Vertegenwoordiging in de EU Представитель в ЕС جهة التمثيل بالاتحاد الأوروبي</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">EC</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">REP</div> </div>	<p>OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, THE NETHERLANDS www.omron-healthcare.com</p>
<p>Production facility Site de production Produktionsstätte Stabilimento di produzione Planta de producción Productiefaciliteit Производственное подразделение منشأة التصنيع</p>	<p>OMRON DALIAN Co., Ltd. Dalian, CHINA</p>
<p>Subsidiary Succursale Niederlassung Consociata Empresa filial Dochteronderneming Филиал الشركات التابعة</p>	<p>OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, U.K.</p> <p>OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH Gottlieb-Daimler-Strasse 10, 68165 Mannheim, GERMANY www.omron-healthcare.de</p> <p>OMRON SANTÉ FRANCE SAS 14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, FRANCE Uniquement pour le marché français: OMRON Service Après Vente N° Vert 0 800 91 43 14 consommateurs@omron-sante.fr www.omron-healthcare.fr</p>

Made in China
Fabriqué en Chine
Hergestellt in China
Fabricado en China

Prodotto in Cina
Geproduceerd in China
Сделано в Китае
صنع في الصين